



ENTSPANNUNG FÜR IHRE ZÄHNE



Informationen Sie fragen wir antworten

Welche Schienenarten gibt es?
Funktions-, Aufbiss- und Schutzschienen.

Wie lange muss ich die Schiene tragen?
Die Tragezeit Ihrer Schiene wird individuell von Ihrem Zahnarzt festgelegt. Das Tragen in der Nacht wird empfohlen. Die allgemeine Empfehlung für das Tragen einer Schiene beträgt 24 Stunden. Lediglich zu den Mahlzeiten und zum Trinken (außer Wasser) wird die Schiene herausgenommen.

Wie pflege ich die Schiene richtig?
Ganz einfach. Benutzen Sie eine Zahnbürste, Zahnpasta ohne Schleifmittel und reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Schiene täglich. Gern können Sie die Schiene auch in einem Ultraschallbad reinigen. Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Schiene haben, finden Sie hier Pflegehinweise für Ihre Schiene:



Wann sollte ich zur Kontrolle oder Anpassung der Schiene zurückkommen?
Diese Entscheidung teilt Ihnen Ihr Zahnarzt / Ihre Zahnärztin beim Aufklärungsgespräch mit.

Wie kann ich die Schiene aufbewahren, wenn ich sie gerade nicht trage?
Sie erhalten von uns gratis eine hübsche Schienenbox zum Transport Ihrer Schiene.

Kontakt zu uns

Adresse: **Otten Dental GmbH**
Richtweg 19 - 28195 Bremen

Fon: T 0421 - 841 30 80
F 0421 - 841 30 814

info@otten-dental.de
f /Otten Dental GmbH

www.otten-dental.de



Patienteninformation

Auf die Schiene gesetzt





NEU

Der Klassiker unter den Schienen

- Transparente Schiene aus PMMA-Kunststoff (Polymethylmethacrylat)
- Schutzschiene für Bruxer und Knirscher
- Eignung als Aufbisschiene
- Geprüft im CAD/CAM-Verfahren

VORTEILE DER OTTEN CLASSIC SPLINT

- + Beste Passgenauigkeit und Bruchstabilität
- + Optisch ansprechende Schiene
- + Geschmacksneutralität
- + Gute Verträglichkeit + hohe Biokompatibilität
- + Kassenleistung

Erhöhter Tragekomfort

- Flexible und glasklare Schiene
- „Memory Effekt“ durch Flexibilisierung, dadurch passt sich die Schiene leicht an
- Vor Gebrauch in warmes Wasser (40 -50°C) legen
- Geprüft im CAD/CAM-Verfahren

VORTEILE DER OTTEN COMFORT SPLINT

- + Tragekomfort durch das flexible Material
- + Präzise Anpassung im Mund
- + Keine Vergilbung, da frei von Amininen
- + Stabilisierung der Kiefergelenke
- + Gute Verträglichkeit + höchste Biokompatibilität
- + Kassenleistung nach Antragstellung bei der Krankenkasse

Herstellung Ihrer individuell angepassten Schiene:

1 EIN PRÄZISER ABDRUCK IST DIE GRUNDLAGE FÜR DIE INDIVIDUELLE SCHIENENHERSTELLUNG
Digitale Abformung mit dem Intraoralscanner bzw. Abdrucknahme bei Ihrem Zahnarzt /Ihrer Zahnärztin: Präziser Abdruck ist der Ausgangspunkt für die individuelle Schienenherstellung.

2 MODELLE

Erstellung eines hochpräzisen Modells (virtuell oder als 3D-Druckmodell) für die Schienenherstellung in unserem Dentallabor.

3 CAD-DESIGN

Design Ihrer individuellen Schiene mit moderner Computer-Aided Design (CAD)-Technologie.

4 FRÄSEN

Herstellung der Schiene durch innovatives und präzises Fräsen, um eine exakte Passform und höchsten Tragekomfort zu gewährleisten.

5 SIE ERHALTEN IHRE SCHIENE

Nach Fertigstellung erfolgt eine genaue Anpassung durch Ihren Zahnarzt / Ihre Zahnärztin um sicherzustellen, dass die Schiene optimal sitzt und ihren therapeutischen Zweck erfüllt.

