



COMFORT **SPLINT**



# PFLEGEHINWEISE FÜR IHRE SCHIENE

## Otten Dental GmbH

Richtweg 19 • 28195 Bremen

**T** 0421 - 841 30 80

**F** 0421 - 841 30 814

info@otten-dental.de

**f** /Otten Dental GmbH



[www.otten-dental.de](http://www.otten-dental.de)

# PFLEGEHINWEISE FÜR IHRE SCHIENE



## TÄGLICHE REINIGUNG

- ▶ Reinigen Sie Ihre Schiene möglichst vor und nach jedem Tragen
- ▶ Entfernen Sie Speichel und Rückstände mit warmem Wasser (nicht heißer als ca. 45°C)
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung Ihre Zahnbürste und Zahngel (keine Zahnpasta mit Schleifmittel) oder Geschirrspülmittel
- ▶ Bitte keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsüblichen Prothesenreiniger verwenden



## Hinweise

- ▶ Einfaches Einsetzen dank Memory-Effekt. Die Schiene passt sich perfekt an Ihre Zähne an und ermöglicht Ihnen ein einfaches und zeitsparendes Einsetzen
- ▶ Vor jedem Tragen für mindestens 20 Sekunden in ca. 45°C warmes Wasser legen (nicht heißer)
- ▶ **TAUCHEN SIE** die Schiene **NICHT** in Wasser, das heißer ist als ca. 45°C, da sich die Schiene sonst verziehen könnte



COMFORT SPLINT

## Aufbewahrung

- ▶ Bewahren Sie Ihre Schiene in der mitgelieferten Schienenbox auf
- ▶ Bitte achten Sie darauf, dass die Schiene trocken ist und bei Raumtemperatur in der Schienenbox aufbewahrt wird